

LANG CUBE DE FIXATION blanc (Ref 801)
LANG CUBE DE FIXATION rouge (Ref 802)
LANG BÂTONNET DE FIXATION (Ref 901)



Objectif

Les CUBES et le BÂTONNET de fixation de LANG sont des produits orthoptiques pour le diagnostic binoculaire, à utiliser principalement par les ophtalmologistes, les orthoptistes, les optométristes et les opticiens. Ils ont été conçus par J. Lang, inventeur du LANG-STEREOTEST®, pour faciliter l'examen orthoptique des enfants. Ils sont utilisés pour l'évaluation de la fixation des yeux, de la motilité, de l'accommodation, de la convergence, pour le test de couverture et pour préparer le patient au LANG-STEREOTEST® ou au LANG-STEREOPAD®.

Caractéristiques principales et instructions d'utilisation

CUBE DE FIXATION de LANG blanc et rouge : Les deux versions sont utilisées de la même manière : Montrer le cube en tenant la poignée verticalement à env. 30cm de distance, afin que le patient puisse voir l'image présentée. Sollicitez l'attention en lui demandant ce qu'il voit et observez la position des yeux et les mouvements de fixation. Tournez la poignée pour présenter l'image suivante, demandez à nouveau ce qui est montré sur la surface présentée et continuez à observer les yeux. Déplacez le cube dans toutes les directions (vers le côté et vers le haut) pour tester la motilité des yeux. Approchez lentement le cube en montrant le dessus ou une autre surface au patient, pour tester la convergence.

Le BÂTONNET DE FIXATION de LANG de fixation s'utilise de la même manière que les cubes. Demandez à votre patient de regarder et de nommer les motifs de l'image dans l'ordre, de haut en bas, tout en observant les mouvements de ses yeux. Utilisez le verso pour déterminer l'acuité visuelle de près (0,2-0,5) à une distance de lecture de 30 cm, ainsi que l'accommodation et la convergence.

Note



Ne donnez pas les aides de fixation à vos patients, surtout pas aux petits enfants, pour éviter de casser le manche ou d'avaler une partie. Les incidents graves liés au produit doivent être signalés à l'autorité compétente.

Soins : Il est préférable de les nettoyer avec un chiffon humide ou un produit de désinfection des surfaces.

Pour la littérature scientifique, les instructions dans d'autres langues et les distributeurs mondiaux : www.lang-stereotest.com



LANG-STEREOTEST AG
CH-8700 Küsnacht
Switzerland

LANG-STEREOTEST®



801-802-901-fr 2021-09/ V1



Copyright ©, 2021. Tous droits réservés.