

LANG FIXATIEDOBBELSTEEN wit (Ref 801)

LANG FIXATIEDOBBELSTEEN rood (Ref 802)

LANG FIXATIESTOKJE (Ref 901)



Gebruik


De LANG FIXATIEDOBBELSTEEN en het LANG FIXATIESTOKJE zijn orthoptische producten voor binoculaire diagnostiek die door oogartsen, orthoptisten, optometristen en opticiens worden gebruikt. In de jaren tachtig zijn ze ontwikkeld door J. Lang, de uitvinder van de LANG-STEREOTEST®, vooral om het orthoptisch onderzoek bij kinderen te vergemakkelijken. Ze maken zelf geen directe diagnose mogelijk, maar dienen als hulpmiddel bij de beoordeling van de fixatie, motiliteit, accommodatie, convergentie, voor de covertest en om de patiënt voor te bereiden op het onderzoek met de LANG-STEREOTEST® of de LANG-STEREOPAD®.

Belangrijkste kenmerken en gebruiksaanwijzing

LANG FIXATIEDOBDELSTEEN wit en rood: laat de patiënt de dobbelsteen op een afstand van ongeveer 30 cm zien door het handvat verticaal vast te houden. Trek zijn aandacht door te vragen wat hij ziet en observeer de oogpositie en fixatiebewegingen. Draai het stokje om het volgende plaatje te laten zien, vraag opnieuw wat er op die kant van de dobbelsteen te zien is en blijf de ogen observeren. Beweeg de dobbelsteen in alle richtingen (naar de zijanten en omhoog) om de oogbewegingen te testen. Laat de dobbelsteen met één kant langzaam dichterbij de patiënt komen om de convergentie te testen.

LANG FIXATIESTOKJE: Houd het stokje verticaal op een leesafstand van ongeveer 30 cm en laat de patiënt de figuren één voor één van boven naar beneden bekijken en benoemen terwijl je hun oogbewegingen observeert. Gebruik de achterkant om de visus dichtbij (0,2-0,5) te bepalen, evenals de accommodatie en de convergentie.

Opmerkingen

 Geef de fixatiestokjes niet aan kinderen om te voorkomen dat het handvat afbreekt. Ernstige incidenten met het product moeten aan de bevoegde autoriteit worden gemeld. Reinig de onderdelen met een vochtige doek of een ontsmettingsmiddel.

Voor wetenschappelijke literatuur, instructies in andere talen en internationale distributeurs: www.lang-stereotest.com



LANG-STEREOTEST AG
CH-8700 Küsnacht
Zwitserland

LANG-STEREOTEST®



801- 802-901-nl 2021-09/ V1



Copyright ©, 2021. Alle rechten voorbehouden.