

LANG FIXATION CUBE hvid (Ref 801)

LANG FIXATION CUBE rød (Ref 802)

LANG FIXATION STICK (Ref 901)



På tænkt anvendelse

LANG FIXATION CUBE og LANG FIXATION STICK er ortoptiske produkter til binokulær diagnostik, der anvendes af øjenlæger, ortoptister, optometriste og optikere. De blev udviklet af J. Lang, opfinderen af LANG-STEREOTEST®, i 1980'erne for at forenkle ortoptiske undersøgelser, især hos børn. De giver ikke mulighed for at stille en direkte diagnose, men hjælper med at vurdere fiksation, motilitet, akkommodation og konvergens. De kan også bruges til covertesten og til at indlede undersøgelsen med LANG-STEREOTEST® eller LANG-STEREOPAD®.

Vigtigste funktioner og brugsanvisning

LANG FIXATION CUBE hvid og rød: Vis terningen til patienten i en afstand på ca. 30 cm i en lodret position. Få patientens opmærksomhed ved at spørge, hvad han/hun kan se, og observer hans/hendes øjenposition og fiksation. Drej pinden for at vise det næste billede, spørg igen, hvad der ses, og fortsæt med at observere øjnene. Bevæg fiksationsstaven i alle blikretninger (op, ned, til siderne, skråt op og ned) for at teste øjenmotiliteten. Før terningen hen mod patientens næse for at teste konvergens.

LANG FIXATION STICK: Hold fiksationspinden lodret i en afstand på ca. 30 cm, og lad patienten se og navngive billederne et efter et, mens du observerer øjenbevægelserne. Brug bagsiden til at bestemme nærsynsstyrke (0,2-0,5) samt akkommodation og konvergens.

Noter



Produkterne skal ikke gives til børn uden opsyn, da der er risiko for at små dele knækker af. Alvorlige hændelser med produktet skal indberettes til den passende myndighed. Rengør delene med en fugtig klud eller et overfladedesinfektionsmiddel.

For videnskabelig litteratur, vejledninger på andre sprog og distributører på verdensplan: www.lang-stereotest.com



LANG-STEREOTEST AG
CH-8700 Küsnacht
Schweiz

LANG-STEREOTEST®



801-802-901-da 2022-01/ V1



A.Lang-Lieder
Murstrasse 48
A-6063 Rum

Copyright ©, 2021. Alle rettigheder forbeholdes.