

LANG FIXAČNÍ KOSTKA bílá

Ref 801)

LANG FIXAČNÍ KOSTKA červená

(Ref 802)

LANG FIXAČNÍ TYČINKA

(Ref 901)



Využití

LANG FIXAČNÍ KOSTKA a LANG FIXAČNÍ TYČINKA jsou ortoptické produkty, které využívají oftalmologové, ortoptisté, optometristé a optici, pro diagnostiku binokulárního vidění. Vyvinul je J. Lang, vynálezce přístroje LANG-STEREOTEST®, v 80. letech 20. století, aby usnadnil ortoptické vyšetření u dětí. Neumožňují přímou diagnózu, ale slouží jako pomůcka pro posouzení fixace očí, motility, akomodace, konvergence, pro zakrývací test a také pro přípravu vyšetřovaného na vyšetření pomocí LANG-STEREOTEST® nebo LANG-STEREOPAD®.

Hlavní vlastnosti a návod k použití

LANG FIXAČNÍ KOSTKA bílá a červená: Obě verze se používají stejným způsobem. Ukažte kostku vyšetřovanému ve vzdálenosti přibližně 30 cm od očí tak, že držíte rukojeť ve svislé poloze. Upoutejte pozornost vyšetřovaného tím, že se ho zeptáte, co vidí, a sledujte postavení očí a fixační pohyby. Otočte rukojeť a ukažte další obrázek, znovu se zeptejte, co je vidět na ukázané straně kostky, a pokračujte v pozorování očí. Pohybujte kostkou do všech směrů (horizontálně i vertikálně) a vyšetřete motilitu očí. Pomalu přiblížte krychli k vyšetřovanému jednou stranou kostky, abyste vyšetřili konvergenci.

LANG FIXAČNÍ TYČINKA: Držte tyč ve svislé poloze ve vzdálenosti asi 30 cm a nechte vyšetřovaného, aby si prohlížel a pojmenovával jednotlivé obrázky odshora dolů, zatímco vy budete pozorovat pohyby jeho očí. Pomocí zadní strany určete zrakovou ostrost do blízka (0,2-0,5), akomodaci a konvergenci.

Poznámky

Nepůjčujte fixační pomůcky vyšetřovaným, obzvláště pak dětem, aby nedošlo k ulomení rukojeti a spolknutí drobných částí. Závažné incidenty týkající se výrobku musí být nahlášeny příslušnému úřadu.



Péče: Produkty očistěte navlhčeným hadříkem nebo povrchovým dezinfekčním prostředkem.

Vědecká literatura, návody v jiných jazycích a celosvětoví distributoři: www.lang-stereotest.com.



LANG-STEREOTEST AG
CH-8700 Küsnacht
Schweiz

LANG-STEREOTEST®



801-802-901-cs 2022-01/ V1



A.Lang-Lieder
Murstrasse 48
A.6065 Rum

Vyrobeno ve Švýcarsku.

Copyright ©, 2021.
Všechna práva vyhrazena.