

LANG FIXATION CUBE White

(Nr. 801)

LANG FIXATION CUBE Red

(Nr. 802)

LANG FIXATION STICK

(Nr. 901)



Paredzētais lietojums


LANG FIXATION CUBE (LANG fiksācijas kubs) un LANG FIXATION STICK (LANG fiksācijas stienītis) ir ortoptikas produkti binokulārai funkciju pārbaudei, ko izmanto oftalmologi, ortoptiķi, optometristi un optiķi. Tos izstrādāja LANG-STEREOTEST® izgudrotājs Josefs Lang (Joseph Lang) 20. gadsimta 80. gados, lai atvieglotu binokulāro funkciju pārbaudi bērniem. Tos lieto acu fiksācijas, kustības, akomodācijas, konverģences novērtēšanai, aizklāšanas testa veikšanai un pacienta sagatavošanai pirms LANG-STEREOTEST® vai LANG-STEREOPAD® pārbaudes.

Galvenās produkta īpašības un lietošanas instrukcija

LANG FIXATION CUBE ir pieejamas baltā un sarkanā krāsā, un to pielietojums ir vienāds: parādiet pacientam kubu parastajā lasīšanas distancē (30 - 40 cm attālumā), turot rokturi vertikāli tā, lai pacients varētu redzēt uz kuba skaldnes attēloto objektu. Pievērsiet pacienta uzmanību, jautājot, ko viņš redz, un novērojiet acu stāvokli un fiksācijas kustības. Pagrieziet rokturi, lai parādītu nākamo attēlu, un vēlreiz pajautājiet, kādu objektu pacients redz, vienlaikus novērojot pacienta acu kustības. Kustiniet kubu visos virzienos (uz sāniem un uz augšu), lai pārbaudītu acu kustības. Lai pārbaudītu konvergenci, lēni pacienta acīm tuviniet kādu no kuba skaldnēm jeb virsmām.

LANG FIXATION STICK tiek lietots līdzīgi kā LANG FIXATION CUBE: turiet kociņu vertikāli un lūdziet pacientam apskatīt un nosaukt attēlus secībā no augšas uz leju, vienlaikus novērojot viņa acu kustības. Lietojiet stienīša otru pusi tuvuma (0,2-0,5) redzes pārbaudei 30 cm attālumā, kā arī akomodācijas un konverģences novērtēšanai.

Uzmanību!

 Neļaujiet pacientiem, it īpaši maziem bērniem, turēt fiksācijas instrumentus, lai netiktu laužts instrumenta rokturis vai kāda detaļa netiktu norīta. Lūgums ziņot par nopietniem negadījumiem, kuri izriet no produkta lietošanas, kompetentajām iestādēm.

Aprūpe: Notīriet detaļas ar mitru drānu vai virsmas dezinfekcijas līdzekli.

Zinātniskā literatūra, instrukcijas citās valodās un tirdzniecības partneri visā pasaulē: www.lang-stereotest.com.



LANG-STEREOTEST AG
CH-8700 Küsnacht, Šveice



801- 802-901-lv 2021-09/ V1

LANG-STEREOTEST®



Copyright©, 2021 Visas tiesības aizsargātas.