

LANG FIKSERINGSKUBE hvit
LANG FIKSERINGSKUBE rød
LANG FIKSERINGSSTAV

(Ref 801)

(Ref 802)

(Ref 901)



Tiltenkt bruk

LANG FIKSERINGSKUBE og LANG FIKSERINGSSTAV er ortoptiske produkter for binokulær diagnostikk, brukt av øyeleger, ortoptister, optometriste og optikere. De ble utviklet av J. Lang, oppfinneren av LANG-STEREOTEST®, på 1980-tallet for å lette den ortoptiske undersøkelsen, særlig hos barn. De stiller ikke en direkte diagnose, men brukes til å vurdere øyefiksasjon, motilitet, akkomodasjon, konvergens, for covertesten, samt som forberedelse av pasienten til undersøkelse med LANG-STEREOTEST® eller LANG-STEREOPAD®.


Hovedegenskaper og bruksanvisning

LANG FIKSERINGSKUBE, hvit og rød: Hold terningen vertikalt ca. 30 cm fra pasienten. Fang pasientens oppmerksomhet ved å

spørre hva vedkommende ser, og observerer øyeposisjon og fikseringsbevegelser. Vri håndtaket for å vise neste bilde. Spør igjen hva som vises på den presenterte flaten, og fortsett å observere øynene. Beveg terningen i alle retninger (sideveis og oppover) for å teste øyebevegelser. Før terningen sakte mot pasienten med en av flatene for å teste konvergens.

LANG FIKSERINGSSTAV: Hold staven vertikalt i en leseavstand på ca. 30 cm, og la pasienten se på og navngi bildene en etter en fra toppen til bunnen mens du observerer øyebevegelser. Bruk baksiden til å måle nærvisus (0,2-0,5), akkomodasjon og konvergens.

Merknader

 Ikke la barn holde i pinnen for å unngå at håndtaket knekker. Alvorlige hendelser må rapporteres til relevant myndighet. Rengjør delene med en fuktig klut eller et overflatedesinfeksjonsmiddel.

Vitenskapelig litteratur, bruksanvisninger på andre språk og globale distributører: www.lang-stereotest.com



LANG-STEREOTEST AG
CH-8700 Küsnacht
Sveits

LANG-STEREOTEST®



801- 802-901-no 2021-09/ V1

Copyright ©, 2021 Alle rettigheter forbeholdt.